

公司简介

我公司成立于 1995 年，坐落于天津市津南区双港工业园鑫港四号路 3 号。产品品牌为“长行”牌系列轮椅。

“长行”系列轮椅车依据 GB/T13800-2009 国家标准生产，主要适用于老年行动不便及下肢残疾人使用。产品于 1998 年通过国家轮椅车质量检测，检测号为 (99) 量认 (国) 字 (Z1034) 号。1999 年通过日本财团法人自行车产业振兴协会技术研究所手动车走行耐久性实验并通过了 ISO9001 质量体系认证，在 2009 年我公司通过 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证并取得证书。

公司下属的“长静中老年日用品有限公司”以敬老、爱老、助老为社会己任，为中老年人提供品种齐全、功能齐备的用品用具。用我们的真诚和关爱陪伴您幸福的生活。

“长行”牌系列轮椅车具有结构美观新颖、转向灵活、使用稳定、坚固耐用、乘坐舒适等特点，本产品具有折叠功能，便于存放和携带，是乘坐者理想的代步工具。

我公司的宗旨是“全心全意为残疾人服务”，“长行轮椅陪伴您同行”是我们的心愿。

请仔细阅读使用方法，注意事项后再使用!!!

一、产品性能结构特点：

长行系列轮椅车依据 GB/T13800-2009《手动车轮椅车》国家标准生产主要适用于老年行动不便及下肢残疾人使用。

长行系列轮椅车具有结构美观新颖、转向灵活、使用稳定、坚固耐用、乘坐舒适等特点，本产品具有折叠功能，便于存放和携带，是乘坐者理想代步工具车。

由于长行系列轮椅各有其特点，所以请乘坐者可根据自己的实际情况，选择适合自己的车型。

二、使用方法：

乘坐时将轮椅脚踏板竖起，坐稳后再放平脚踏板，双手同时向前或向后扳动左右侧轮椅手圈，使您前进或后退。转弯时如左转，扶住左轮不动，扳动右轮可原地左转；向右反之。前进中适当调节转轮，扳动一侧车轮可实现任意转弯角度。

三、注意事项：

1. 禁止踩、踏脚踏板上车。
2. 自行操作时严禁在斜坡处或行进时休息。
3. 软座面轮椅车折叠存放时，请将轮椅坐垫提起以防夹坏。
4. 脚踏板的高低和角度通过踏板底部螺丝调节。
5. 神志不清及瘫痪患者应由护理人员操作使用此产品。
6. 停车及上、下车时请将驻车闸放到锁紧位置。

四、维护保养：

1. 保持车身清洁置于干燥通风处存放，防止机件锈蚀。
2. 请定期检查轮椅车的使用状况，及时检修，转动部位请定期少量注入润滑油脂。
3. 轮胎保持气压充足，不能长期与油酸等接触以防变质。

五、包装：

长行系列轮椅车折叠后装入瓦楞纸箱包装，内包装为塑料袋。

六、保修期：

1. 车架：三年
2. 前轮：一年
3. 电镀、喷涂：三个月
4. 坐垫、靠背：六个月
5. 踏板：一年



SYIV100-TQ-CX-LHN型
铝合金成人护理型轮椅



SYIV100-TQ-CX-LHN-S型
铝合金儿童脑瘫轮椅



SYIV100-Y-CX-LB型
铝合金软座面轮椅



SYIV100-Y-CX-LB-2-A型
铝合金功能轮椅



SYIV100-CX-LB-2型
铝合金功能轮椅



SYIV100-Y-CX-LB型
可折叠铝合金轮椅



SYIV100-Y-CX-LB-M型
铝合金便携式轮椅



SYIV100-CX-LB-4型
铝合金便携式轮椅



铝合金便携式轮椅



SYIV100-DQ-CX-GHC型
镀铬豪华可躺式多功能轮椅



SYIV100-T-CX-LB-4-S型
铝合金轻便型轮椅



SYIV100-T-CX-LB-3型
铝合金儿童轮椅



SYIV100-T-CX-GB-3型
钢管儿童轮椅



SYIV100-T-CX-GB型
钢管喷塑轮椅



SYIV100-T-CX-GB-2型
钢管护理型轮椅



加宽加重轮椅



CX-DS-1型
电动三轮车



CX-S2型
可倒平摇三轮车



CX-S4型
双手摇三轮车



CX-S3型
推拉式无链条三轮车



铝合金锂电池电动轮椅



CX-DY-N-40型
电动老年代步车



铝合金电动轮椅



钢管电动轮椅



CX-DY-N-20型
锂电池电动轮椅



铝合金折叠电动轮椅



CX-DY-N-20-D型
锂电池电动轮椅



全国联网销售公司

北京分公司	手机：15811549777 13323358365
山东省济南市省供销社大院内解放路26号	电话：0531-88547925
山东省济南市市中区英雄山路20号-1-17	电话：0531-82745166
陕西省西安市长乐西路46号	电话：029-83273024
内蒙古临河市巴盟永祥 医疗器械有限责任公司	电话：0478-8260386
山西省太原市王村南街226号	电话：0351-7232204
河北省唐山市路南残疾人用品供应公司	电话：0315-2813162
河南省郑州市经二路13号	电话：0371-5965036
湖南省娄底科悦思医疗器械有限公司	电话：13973889114
石家庄市泰华街94号	电话：0311-87882077
河北省邢台市达活泉西大街289号	电话：0319-7613397

1. 长行牌轮椅车通过国家轮椅质量检测中心抽检检测号为(99)量认(国)字(Z1034)号。
2. 许可证号：津食药监械生产许20110180号。
3. 医疗器械注册证：津械注准20212190120。
4. 中国中轻产品质量保障中心质量保证产品。
5. 长行牌轮椅车99年。通过日本财团法人自行车产业振兴协会，技术研究所手动车走行耐久性试验。

公司地址：天津市津南区双港工业园鑫港四号路3号
Add: No. 3, XinGang Road 4, Shuang Gang Industrial zone, Jin Nan District, Tian Jin.

公司电话：(Tel): (022)28343437 28347414

传 真：(Fax): (022)28347414

邮 编：(P.S.): 300350

市内销售电话：18902128377

网 址：http://www.tjcljy.cn

E-mail: 745826739@qq.com 1559543610@qq.com

QQ: 745826739 1559543610